

کترهای همودیالیز دائم ARROW

Teleflex[®]
MEDICAL



Chronic Hemodialysis Catheters

Teleflex[®]
MEDICAL

DIALYSIS ACCESS

چاپ چهارم، تابستان ۱۴۰۲

ایران فارمیس
IRAN PHARMIS

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۸۵۳۷۹۸۲
www.iranpharmis.org



کتر ARROW NextStep Antegrade

کتر همودیالیز دائم تونلی با تکنیک Antegrade



اجزای ویژه ست های دیالیز
شیت دیالیز هموستاتیک
Arrow SmartSeal

ساختار سازگار با الکل
سازگار و منطبق با طیف
وسیع از مواد آنتی سپتیک
شامل الکل و ید.



کتر همودیالیز Nextstep Antegrade به منظور برآوردن
اهداف زیر طراحی شده است:
سهولت هنگام ورود مختص کترهای Step-Tip
فلوی بالا مختص کترهای Split-Tip

سهولت در ورود کترهای Nextstep Antegrade


نوک این کترها به نحوی طراحی شده است که در برگیرنده ویژگی های
زیر باشد:
- عبور هموار حین ورود و تعویض از روی گاید وایر.
- عبور راحت از درون شیت.

طراحی شده جهت داشتن حداکثر فلو و حداقل میزان Recirculation

به منظور کاهش Recirculation و داشتن فلوی بالا، کترهای
Arrow Nextstep Antegrade دارای دو ویژگی منحصر به فرد
می باشند:


- جهت برخورداری از فلوی بهتر، پورت ها بصورت وارونه طراحی شده اند:
- خون از پورت ورودی به SVC می رود.
- پورت شریانی خون را از دهلیز راست می گیرد.
- منافذ کناری روی سر کتر به منظور گرفتن خون از تمامی اطراف طراحی شده اند.
- پورت ها کاملا از هم جدا هستند تا علاوه بر افزایش فلو، Recirculation را نیز به حداقل برسانند.

نمودار فشار نسبت به فلو: طراحی شده جهت داشتن حداکثر فلو

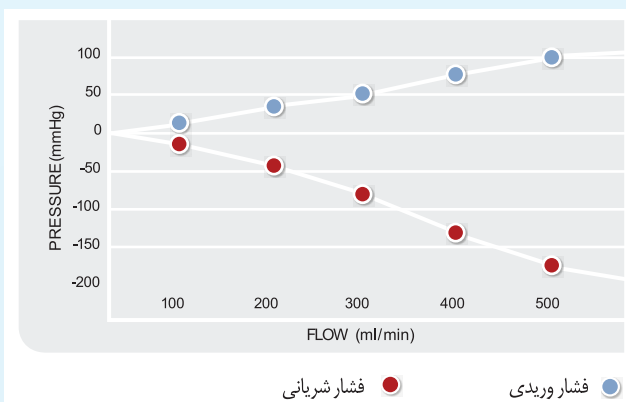

پورت های وارونه

جهت داشتن فلوی بالا، پورت های کمتر
Nextstep Antegrade بصورت وارونه
هستند: پورت وریدی در SVC و پورت
شریانی در دهلیز راست قرار می گیرد.

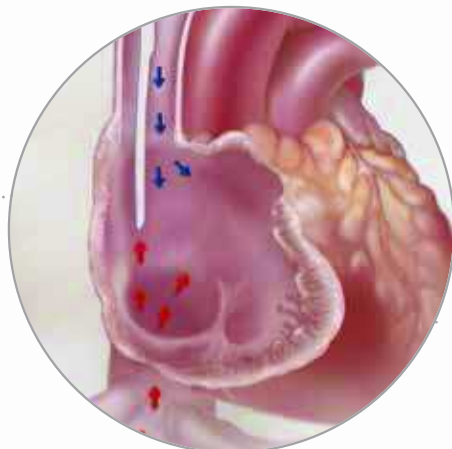

پورت شریانی

طراحی شده جهت بهینه
سازی فلو از طریق قرارگیری
در دهلیز. منافذ کناری خون را
از تمامی جهات می گیرند.




ورود آسان

طراحی ویژه جهت عبور هموار از
درون شیت و ورود از روی گایدهوایر.

پورت وریدی

جدایی کامل از پورت شریانی سبب
افزایش فلو و به حداقل رسیدن
Recirculation می گردد.

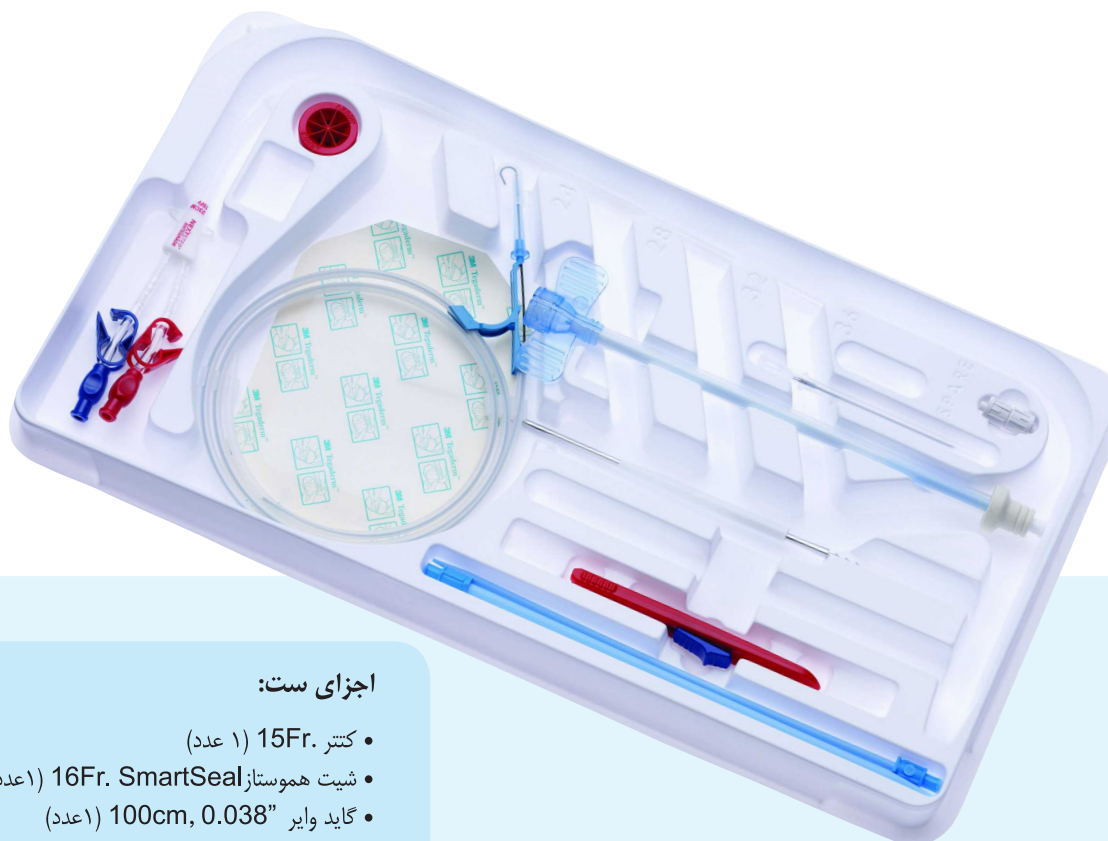

اجزای ست:

- کتتر 15Fr. (۱ عدد)
- شیت هموستاز 16Fr. SmartSeal (۱ عدد)
- گاید وایر 100cm, 0.038" (۱ عدد)
- سوزن 6.35cm, 18Ga. (۱ عدد)
- تونلر فلزی (۱ عدد)
- هاب (۱ عدد)
- درپوش های Luer-Lock (۲ عدد)
- دایلاتور تونل (۱ عدد)
- پانسمان 12cm × 10cm (۱ عدد)
- دایلاتور 12Fr. (۱ عدد)
- دایلاتور 14Fr. (۱ عدد)
- قطعه ایمنی جهت سوزن (۱ عدد)
- تیغ بیستوری شماره ۱۱ (۱ عدد)
- لوله و کلمپ (۱ عدد)
- کلمپ کتتر (۱ عدد)

ARROW		ست کتتر گذاری ARROW NEXTSTEP ANTEGRADE
شماره کاتالوگ	شرح	طول ورودی (نوک تا کاف)
CS-15192-SFX	ARROW 15 Fr. x7.5" (19 cm) radiopaque polyurethane catheter	19cm
CS-15232-SFX	ARROW 15 Fr. x9" (23 cm) radiopaque polyurethane catheter	23 cm
CS-15272-SFX	ARROW 15 Fr. x10.5" (27 cm) radiopaque polyurethane catheter	27cm
CS-15312-SFX	ARROW 15 Fr. x12" (31 cm) radiopaque polyurethane catheter	31 cm
CS-15422-SFX	ARROW 15 Fr. x16.5" (42 cm) radiopaque polyurethane catheter	42 cm
CS-15502-SFX	ARROW 15 Fr. x19.7" (50 cm) radiopaque polyurethane catheter	50 cm

Not made with natural rubber latex.