



محصولات جراحی Teleflex



شرکت ایران فارمیس با چهار دهه سابقه در زمینه واردات و توزیع محصولات پزشکی در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت ها در این زمینه به شمار می رود و مفتخر است که به عنوان نماینده انحصاری Teleflex نسبت به عرضه محصولات Pilling، Hudson RCI، Gibeck، LMA، Arrow، Rusch و Weck اقدام نموده است. مأموریت این شرکت، یاری رساندن به بیماران در جهت بهبود آن ها است و همواره در زمینه خدمت به جامعه پزشکی و ترویج تکنولوژی های برتر و مدرن فعالیت می نماید و در همین راستا با بهترین و شناخته شده ترین کمپانی های جهان همکاری دارد. شرکت ایران فارمیس دارای گواهی های ISO13485 و ISO9001 می باشد و همواره انطباق با استانداردهای بین المللی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

کمپانی Teleflex با فعالیت در بیش از ۱۳۰ کشور، به عنوان تولیدکننده پیشرو و عمده وسایل پزشکی در جهان به شمار می رود. تخصص این مجموعه در تولید محصولات پزشکی در زمینه های مختلفی چون بیحسی موضعی، مراقبت قلبی، دسترسی عروقی، تنفسی، جراحی، اورولوژی بیهوشی و تنفسی می باشد. Rusch و Weck، از جمله زیرمجموعه های کمپانی Teleflex هستند که لوازم مورد نیاز برای پروسه های جراحی، از عمل تا بهبود را فراهم می نمایند. این زیرمجموعه ها در این زمینه به عنوان پیشرو بازار در نوآوری و ایمنی جراحی بوده و ابزارهای باکیفیت و منحصر به فردی را ارائه می نمایند.

Weck در سال ۱۸۸۴ تاسیس شد و در سال ۱۹۹۳ به Teleflex پیوست. فعالیت این کمپانی در زمینه محصولات جراحی باز و لاپاروسکوپی (انواع پورت، سیستم های لیگاسیون پلیمری و فلزی، استپلرهای پوستی و ...) می باشد. محصولات این کمپانی دارای عملکرد تضمین شده ایمن و سریع، قیمت مناسب و کیفیت بالا هستند.


RÜSCH از تولیدکنندگان صاحب تکنولوژی است که فعالیت خود را از حدود ۱۷۷ سال قبل آغاز نمود و در سال ۱۹۸۹ به کمپانی Teleflex پیوست. این کمپانی محدوده وسیعی از محصولات پزشکی در زمینه های اورولوژی، بیهوشی، تنفسی، جراحی و گوارشی را با کیفیت فوق العاده مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می نماید.

سیستم جراحی پرکوتانوس Percuvance (Percuvance Surgical System)

ترومای کمتر. قدرت و تنوع ابزار



چطور یک ابزار ۲/۹ میلی متری می تواند کارایی ابزار ۵ میلی متری را داشته باشد؟

شرکت Teleflex ابزارهای منحصر به فرد Percuvance با قطر شفت فقط ۲/۹ میلی متر را با هدف کاهش چشمگیر ترومای بیمار طراحی و مهندسی نموده است به نحوی که همچنان تمامی کارائی و قدرت ابزارهای ۵ میلی متری رایج را به شما خواهد داد. سیستم Percuvance پیشرفت عظیمی در شکل و نحوه انجام عمل های کم تهاجمی معرفی نموده است. در این روش پیشرفته ابزارهای لاپاروسکوپی می تواند مستقیماً از طریق یک انسزیون کوچک روی پوست، بدون تروکار وارد شوند. بیمارهای شما از وجود ترومای خیلی خیلی کمتر بهره می برند و شما از کاربری و قدرت یک ابزار متداول لاپاروسکوپی بهره خواهید برد. با ابزارهای Percuvance، افق های جدیدتری در مقابل جراحی کم تهاجمی قرار خواهد گرفت و حتی کم تهاجمی تر از قبل خواهد بود. سیستم Percuvance همان نتیجه و کارایی فوق العاده موردنظر را در اختیار شما قرار خواهد داد.

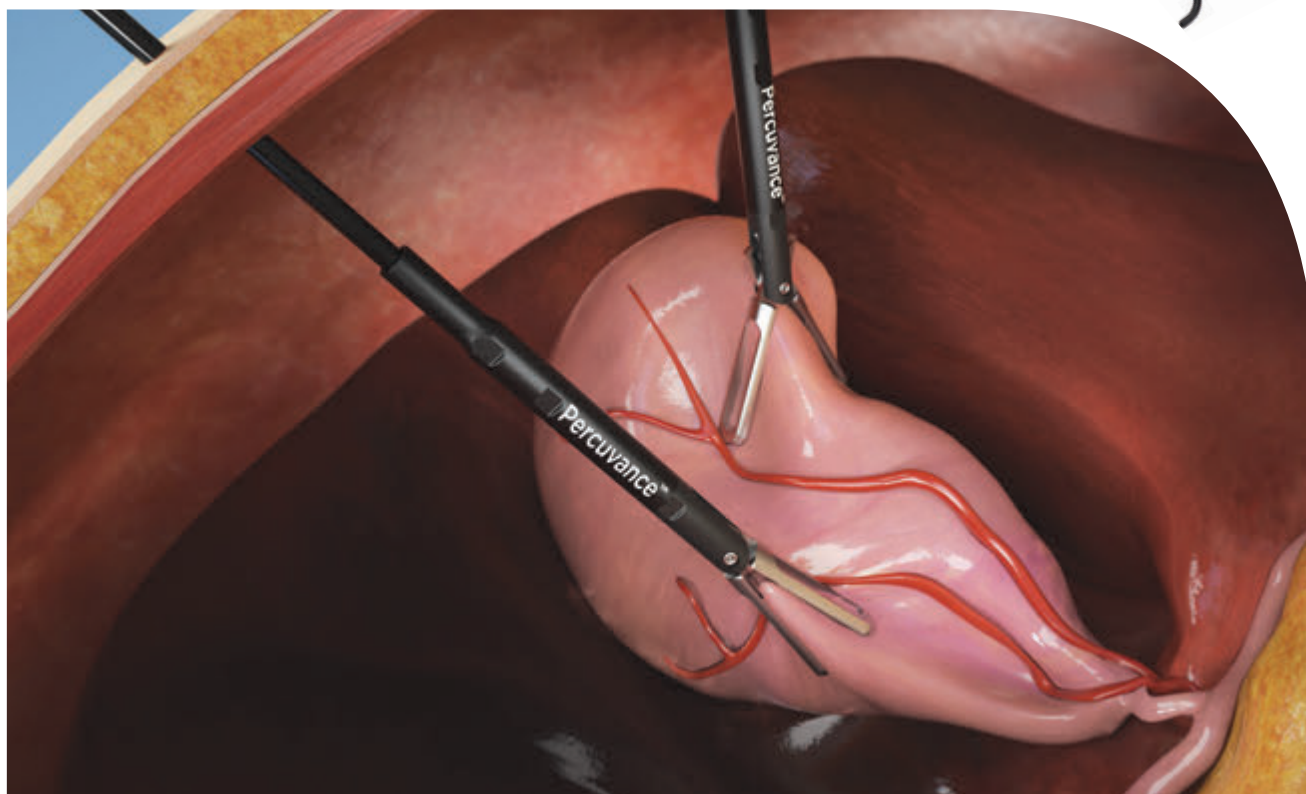

سهولت در انجام عمل های پیچیده

سیستم Percuvance با تکنیک سریع و آسان، مستقیماً از طریق پوست وارد می شود. سپس ابزار ۵ میلیمتری به سر آن وصل می شود و شما می توانید یک یا تعداد بیشتری تروکار را از عمل های لاپاروسکوپی حذف نمایید. در ضمن اینکه به رضایت، بازدهی و نتیجه مورد نظر خود و بیمار دست خواهید یافت.

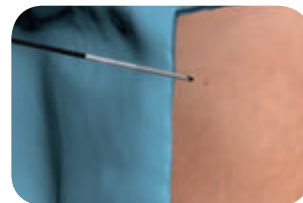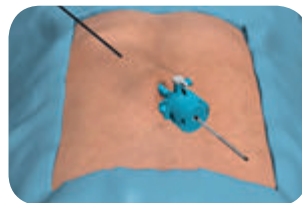

۱. ورود از طریق پوست

با استفاده از اسکالپل شماره ۱۱، یک انسزیون کوچک روی پوست ایجاد کنید و با استفاده از سوزن، به آرامی و مستقیماً شفت را به داخل پوست وارد کنید تا از دیواره شکمی خارج شود.

۲. همسو کردن

شفت را با تروکار موجود همسو کنید و آن را از انتهای تروکار با استفاده از Seal bridge بیرون بیاورید تا Tip آن مشاهده شود.

۳. اتصال سر ابزار ۵ میلی متری

دسته ابزار را باز کنید و ضامن باز کردن شفت را فشار دهید. سر سوزنی شکل را جدا کرده و با اطمینان، ابزار ۵ میلی متری را به شفت متصل کنید. دسته را ببندید. شفت را به حالت قفل برگردانید و آن را تست کنید.

۴. ورود ابزار

ابزار را به داخل بدن برده سپس مراحل قبل را برای استفاده از ابزارهای مختلف تکرار کنید.

ترومای کمتر

جراحی کمتر

تنوع ابزار

یک ابزار با ۷ سر قابل تعویض

با قدرت بالا

دارای قدرتی مشابه ابزار های متداول






Disposable Tool Tips

ITEM CODE	DESCRIPTION	QTY.
PCVINT3	2.9mm Percutaneous Introducer Needle	6
PCVSC5	5mm Scissors	6
PCVGG5	5mm Traumatic Gripper Grasper	6
PCVJG5	5mm Atraumatic Johans Grasper	6
PCVMD5	5mm Maryland Dissector	6
PCVHCA5	5mm Hem-o-lok Clip Applier	6
PCVHK5	5mm Hook Cautery Tip	6
PCVSPT5	5mm Spatula Cautery Tip	6

Disposable Seal Bridges

ITEM CODE	DESCRIPTION	QTY.
PCVSB5	5mm Seal Bridge	6
PCVSB12	12mm Seal Bridge	6

برآورده شدن تمام قدرت و کارایی های مورد نیاز توسط یک ابزار:
افزایش اطمینان در انجام محدوده وسیعی از عمل های لاپاروسکوپی

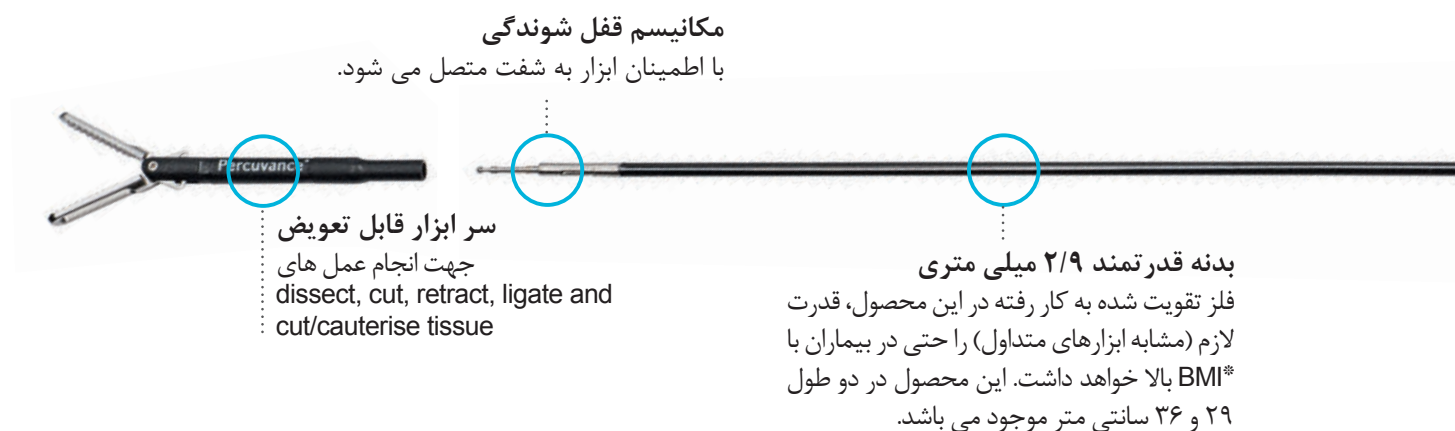

نحوه استفاده

جهت استفاده از سیستم Percuance به صورت زیر عمل کنید.

موارد مورد نیاز:

- دسته با قابلیت استفاده مجدد - با ضامن یا بدون ضامن
- دارای دو سایز شفت
- سوزن های ورودی
- سرهای ابزار - موجود در ۷ نوع
- Seal bridges جهت تعویض ابزار از طریق تروکارهای ۵، ۱۰ و ۱۲ میلیمتری

Reusable Handles

ITEM CODE	DESCRIPTION	QTY.
PCVRH	Ratcheted Handle	1
PCVNRH	Non-Ratcheted Handle	1

Disposable Shafts

ITEM CODE	DESCRIPTION	QTY.
PCVSH3	2.9mm Percutaneous Shaft, 29 cm Length	6
PCVSHL3	2.9mm Percutaneous Shaft, 36 cm Length	6

*Body Mass Index



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸.
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۶۰۴۳۰۶۵ - ۸۸۵۳۷۹۸۲.
No.128, Ghandi (Palizi) St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1554744376, Tel: (+9821) 8396, Fax: (+9821) 88537982.
www.iranpharmis.org