

HARTMANN



محصولات پیشرفته
مدیریت زخم
هارتمن



ایران فارمیس - خط مشی کیفیت

از دیرباز تاکنون همواره مسئله درمان زخم یکی از مسائلی بوده که با زندگی مردم همراه بوده است. بر همین اساس درمانگران و متخصصین همواره بر آن بوده اند تا بتوانند با ابداع روش ها و محصولات جدید، مطابق با پیشرفت تکنولوژی به آن سرعت بخشیده، از درد بیماران بکاهند و طول دوره درمان را کوتاهتر نمایند.

شرکت ایران فارمیس نیز در سال ۱۳۵۸ با مشارکت افراد متخصص در علم پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و همچنین بازرگانان با تجربه در این صنعت به جهت پوشش نیازهای درمانی و تامین سلامت افراد جامعه، تاسیس و شروع به کار نمود. سیاست کیفی ایران فارمیس، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با هزینه بهینه و تحقق رضایت مشتریان است.

شرکت ایران فارمیس در راستای تحقق اهداف فوق، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای ISO9001 و ISO13485 در سازمان پیاده سازی نموده، خود را متعهد به بهبود مستمر و رعایت کامل مقررات و استاندارد های ایمنی محصولات می داند.

محصولاتی که در این کاتالوگ معرفی شده است، توسط شرکت ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Hartmann آلمان در ایران قابل ارائه می باشد.



هیدروترایی

مؤثر و آسان

درمانی جامع برای زخم هایی که ترمیم آن ها به تعویق افتاده است.

- تأثیرگذاری بالا با استفاده از تکنولوژی هیدروترایی خاص هارتمن
- آسان شدن درمان، تنها با استفاده از دو محصول
- مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
- استفاده بسیار راحت

فواید استفاده برای درمانگران و بیماران:

- دوره درمان کوتاه تر
- درمان آسان تر
- کاربرد ایمن
- آسایش خاطر برای بیمار

درمان فقط
با دو
محصول



هیدروتراپی

رطوبت بهینه، ایده آل و کنترل شده در بستر زخم
روشی خلاقانه جهت آسایش بیشتر بیمار

طی دو مرحله زخم ترمیم می شود:

مرحله ۱: نتایج استفاده از خانواده هیدروکلین ادونس

- شستشوی زخم
- جذب متعادل ترشحات زخم
- پاکسازی بستر زخم
- تحریک رشد بافت گرانوله



کاربرد:

در مرحله دبریدمان (التهابی) و گرانولاسیون


مرحله ۲: نتایج استفاده از هیدروتک

- ایجاد رطوبت ایده آل
- جذب ترشحات
- پیشبرد ترمیم زخم
- محافظت از زخم



کاربرد:

در مرحله گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون

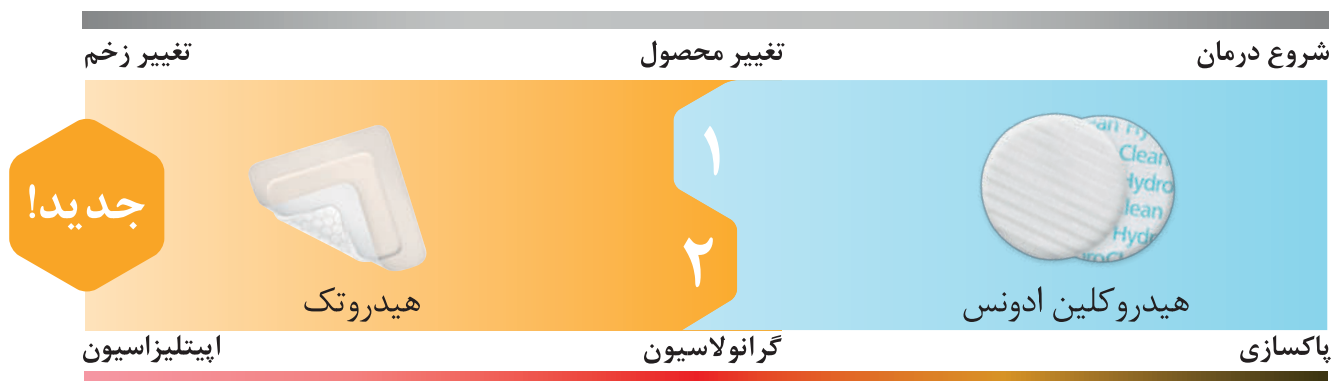

Sorbalgon

سوربالگون

مزایا:

- قدرت جذب ایده آل اگزودای زخم
- کمک به انعقاد نسبی پس از دبریدمان شارپ
- حفظ انسجام و یکپارچگی در هنگام اشباع شدن محصول
- عدم باقی ماندن بقایای پانسمان در سطح زخم
- افزایش سرعت ترمیم زخم به واسطه ایجاد رطوبت بهینه
- تعویض راحت و بدون درد پانسمان

موارد مصرف:

- انواع زخم های حفره ای و سطحی گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد
- تسریع در ایجاد بافت گرانوله از طریق ایجاد رطوبت بهینه



نکته:

- این پانسمان قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.
- در دو نوع نواری و ورقه ایی در سایزهای مختلف موجود می باشد.
- زمان تعویض پانسمان بسته به میزان اگزودای زخم متفاوت است.
- استفاده این پانسمان (آلژینات) در زخم های خشک و بر روی تاندون و استخوان ممنوع است.
- قابل استفاده با پانسمان های Atrauman Ag, HydroTac, Zetuvit Plus Silicone
- نحوه استفاده این پانسمان در زخم های حفره ای و گرانوله به این شکل است که نباید کل حفره زخم با پانسمان پر شود.

HydroTherapy

Efficacy and Simplicity.

Zetuvit® Plus Silicone



HydroTac®



HydroClean® Advance



محصولات زخم‌های مزمن

نام محصول	سایز cm	کد محصول	نام محصول	سایز cm	کد محصول
هیدروکلین ادونس HydroClean Advance	۳	۶۰۹۶۰۹	Zetuvit Plus Silicone /Border زتوویت پلاس سیلیکون بدون چسب/چسب‌دار	۱۷/۵ × ۱۷/۵	۴۱۳۹۳۰
	حفره‌ای-۴	۶۰۹۱۶۲		۱۰ × ۲۰	۴۱۳۸۳۰
	گرد-۴	۶۰۹۶۶۲	Zetuvit Plus زتوویت پلاس	۱۰ × ۱۰	۴۱۳۷۱۰
	۵/۵	۶۰۹۶۶۶		۱۰ × ۲۰	۴۱۳۷۱۱
	۴ × ۸	۶۰۹۶۶۴		۱۵ × ۲۰	۴۱۳۷۱۲
	۷/۵ × ۷/۵	۶۰۹۶۶۸	Sorbalgon سوربالگون	۱۰ × ۲۰	۹۹۹۵۸۹
هیدروزورب ژل Hydrosorb Gel	۱۰ × ۱۰	۶۰۹۶۷۲		۱۰ × ۱۰	۹۹۹۵۹۵
	بیضی ۸ × ۱۴	۶۰۹۶۷۴		۵ × ۵	۹۹۹۵۹۸
	۱۰ × ۱۷	۶۰۹۶۷۶	Sorbalgon T سوربالگون حفره‌ای	۲ × ۳۰	۹۹۹۵۹۲
هیدروتک شفاف چسب‌دار HydroTac Transparent	۱۵gr	۹۰۰۸۴۴		۶ × ۷	۶۸۵۷۷۶
	۶/۵ × ۱۰	۶۸۵۹۲۳	Hydro Film هیدروفیلم	۱۰ × ۱۵	۶۸۵۷۶۰
آترومن نقره Atrauman Ag	۱۲/۵ × ۱۲/۵	۶۸۵۹۲۱		۱۵ × ۲۰	۶۸۵۷۶۲
	۵ × ۵	۴۹۹۵۷۱		۱۰ × ۲۵	۶۸۵۷۶۳
هیدروتک کامفورت HydroTac Comfort	۱۰ × ۱۰	۴۹۹۵۷۳		۱۲ × ۲۵	۶۸۵۷۶۴
	۱۰ × ۲۰	۴۹۹۵۷۵	Hydrocoll هیدروکل	۱۰ × ۱۰	۹۰۰۹۳۸
هیدروتک HydroTac	۱۲/۵ × ۱۲/۵	۶۸۵۸۱۵		۱۵ × ۱۵	۹۰۰۹۳۹
	۱۵ × ۲۰	۵۸۵۸۲۱		۲۰ × ۲۰	۹۰۰۹۴۰
	ساکرال ۱۸ × ۱۸	۶۸۵۸۲۷			
هیدروتک HydroTac	۱۰ × ۱۰	۶۸۵۸۳۲			
	۱۰ × ۲۰	۶۸۵۸۴۱			
	۲۰ × ۲۰	۶۸۵۸۴۲			

محصولات هارتمن در یک نگاه

HydroClean Advance: پانسمان حاوی ذرات فوق جاذب پلی آکریلات به همراه سلولز و رینگر جهت تسهیل دبریدمان تدریجی، کاستن میکروارگانیسم از طریق برداشت و محصور کردن آن در ذرات فوق جاذب و کمک به پاکسازی تاندون و استخوان



Hydrosorb Gel: ژل حاوی رینگر جهت تسهیل دبریدمان بافت مرده



HydroTac Transparent: پانسمان ورقه ای شفاف از جنس پلی اورتان حاوی ژل، مناسب برای زخم های اپیتلیزه یا سوختگی درجه دو



Hydrocoll: پانسمان هیدرو کلوئید برای درمان زخم های غیر عفونی با ترشحات کم تا متوسط



Sorbalgon: پانسمان یا تامپون از رشته های آلژینات کلسیم برای درمان زخم های با اگزودای متوسط تا زیاد



Atrauman Ag: پانسمان نقره چرب جهت پیشگیری و کنترل عفونت




HydroTac: پانسمان فوم حاوی ژل رینگر برای زخم های با ترشح کم تا متوسط



Zetuvit Plus Silicone/Border: پانسمان فوق جاذب سیلیکونی با خاصیت کاهش فشار از موضع زخم جهت زخم های با ترشح خیلی زیاد



Hydrofilm: پانسمان خود چسب شفاف برای حفاظت و درمان زخم های کم ترشح

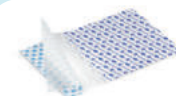

HARTMANN



authorized distributor

Going further for health



Wound
Management

Hartmann Solution Customer Satisfaction



Cosmopor IV

کازماپور آی وی

پانسمان فیکس کننده کتترهای وریدی و آنژیوکت

پوششی استریل، خود چسب و ضد حساسیت همراه با دو پد جاذب غیر چسبنده است که در محل ورود کتتر و زیر قسمت پروانه ای آنژیوکت قرار می گیرد. این پانسمان از الیاف غیر بافته (Non-woven) تهیه شده و دارای چسب ضد حساسیت می باشد و برای بیمار بسیار راحت است.

اصولا در محل ورود کتتر باید یک پانسمان استریل قرار داد و از چسباندن مستقیم چسب غیر استریل بر روی آن خودداری نمود که متأسفانه این امر بسیار رایج است. این پانسمان علاوه بر فراهم کردن محیط استریل، قادر به کنترل ترشحات و نشت احتمالی خون یا مایعات می باشد.

مزایا:

- سهولت کاربرد
- چسبندگی و شکل پذیری ایده آل
- سازگاری با پوست و راحتی بیمار
- ارزان و مقرون به صرفه

موارد مصرف:

- برای تثبیت انواع کتتر و آنژیوکت و همچنین به عنوان پانسمان استریل محل ورود آن ها



