

HARTMANN



authorized distributor

محصولات
درمان زخم
هارتمن



ایران فارمیس_خط مشی کیفیت

از دیرباز تاکنون همواره مسئله درمان زخم یکی از مسائلی بوده که با زندگی مردم همراه بوده است. بر همین اساس درمانگران و متخصصین همواره بر آن بوده اند تا بتوانند با ابداع روش ها و محصولات جدید، مطابق با پیشرفت تکنولوژی به آن سرعت بخشیده، از درد بیماران بکاهند و طول دوره درمان را کوتاهتر نمایند.

شرکت ایران فارمیس نیز در سال ۱۳۵۸ با مشارکت افراد متخصص در علم پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و همچنین بازرگانان با تجربه در این صنعت به جهت پوشش نیازهای درمانی و تامین سلامت افراد جامعه تاسیس و شروع به کار نمود. سیاست کیفی ایران فارمیس، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با هزینه بهینه و تحقق رضایت مشتریان است.

شرکت ایران فارمیس در راستای تحقق اهداف فوق، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای ISO9001 و ISO13485 در سازمان پیاده سازی نموده، خود را متعهد به بهبود مستمر و رعایت کامل مقررات و استانداردهای ایمنی محصولات می داند.

محصولاتی که در این کاتالوگ معرفی شده است، توسط شرکت ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Hartmann آلمان در ایران قابل ارایه می باشد.



هیدروتراپی

مؤثر و آسان

درمانی جامع برای زخم هایی که ترمیم آن ها به تعویق افتاده است.

- تأثیرگذاری بالا با استفاده از تکنولوژی هیدروتراپی خاص هارتمن
- آسان شدن درمان، تنها با استفاده از دو محصول
- مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
- استفاده بسیار راحت

فواید استفاده برای درمانگران و بیماران:

- دوره درمان کوتاه تر
- درمان آسان تر
- کاربرد ایمن
- آسایش خاطر برای بیمار

درمان فقط
با دو
محصول



هیدروتراپی

رطوبت بهینه، ایده آل و کنترل شده در بستر زخم
روشی خلاقانه جهت آسایش بیشتر بیمار

طی دو مرحله زخم ترمیم می شود:

مرحله ۱: نتایج استفاده از خانواده هیدروکلین ادونس

- شستشوی زخم
- جذب متعادل ترشحات زخم
- پاکسازی بستر زخم
- تحریک رشد بافت گرانوله



کاربرد:

در مرحله دبریدمان (التهابی) و گرانولاسیون


مرحله ۲: نتایج استفاده از هیدروتک

- ایجاد رطوبت ایده آل
- جذب ترشحات
- پیشبرد ترمیم زخم
- محافظت از زخم



کاربرد:

در مرحله گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون

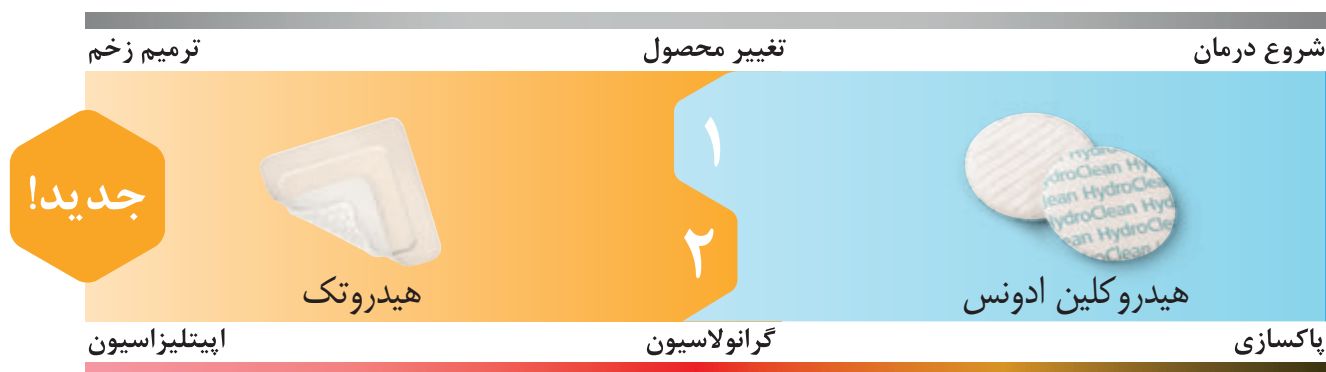

Zetuvit E

زتوویت ایی

مزایا:

- قدرت جذب موثر در زخم ها با ترشح خیلی زیاد
- کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت
- سازگار با پوست و راحت برای بیمار
- ایده آل جهت استفاده در زیر بانداژهای فشاری

موارد مصرف:

- کلیه زخم ها دارای ترشح متوسط تا زیاد
- زخم های باز ناحیه شکم
- زخم های ناشی از نارسایی وریدی و لنفاوی
- زخم های بدخیم



نکته:

- * در زمان استفاده سمت سفید رنگ روی زخم و سمت دارای خط آبی بیرون قرار می گیرد.
- * پانسمان بدون چسب بوده با چسب Omnifix E ثابت می شود.
- * بسته به میزان ترشح، فواصل تعویض پانسمان بین ۳ تا ۵ روز می باشد.
- * محصولات خانواده Zetuvit قابل برش نمی باشد.

محصولات زخم های مزمن

نام محصول	سایز cm	کد محصول	نام محصول	سایز cm	کد محصول
هیدروکلین ادونس HydroClean Advance	۴ cm cavity	۶۰۹۱۶۲	Zetuvit E زتوویت ایی	۱۰×۱۰	۴۱۳۷۷۰
	۵×۵	۶۰۹۶۶۶		۱۰×۲۰	۴۱۳۷۷۱
	۷/۵×۷/۵	۶۰۹۶۶۸		۲۰×۲۰	۴۱۳۷۷۴
	۱۰×۱۰	۶۰۹۶۷۲	Zetuvit Plus Silicone Border زتوویت پلاس سیلیکون بدون چسب/چسبدار	۱۷/۵×۱۷/۵	۴۱۳۹۳۰
هیدروزورب ژل Hydrosorb Gel	۱۵gr	۹۰۰۸۴۴		۱۰×۲۰	۴۱۳۸۳۰
هیدروتک شفاف چسبدار HydroTac Transparent	۶/۵×۱۰	۶۸۵۹۲۳	Sorbalgon سوربالگون	۱۰×۲۰	۹۹۹۵۸۹
	۱۲/۵×۱۲/۵	۶۸۵۹۲۱		۱۰×۱۰	۹۹۹۵۹۵
آترومن نقره Atrauman Ag	۵×۵	۴۹۹۵۷۱		۵×۵	۹۹۹۵۹۸
	۱۰×۱۰	۴۹۹۵۷۳	Sorbalgon T سوربالگون حفره ای	۲×۳۰	۹۹۹۵۹۲
	۱۰×۲۰	۴۹۹۵۷۵	Hydro Film هیدروفیلیم	۶×۷	۶۸۵۷۷۶
هیدروتک کامفورت HydroTac Comfort	۱۲.۵×۱۲.۵	۶۸۵۸۲۱		۱۰×۱۵	۶۸۵۷۶۰
	۱۵×۲۰	۶۸۵۸۲۱		۱۵×۲۰	۶۸۵۷۶۲
هیدروتک ساکرال HydroTac Sacral	۱۸×۱۸	۶۸۵۸۲۷		۱۰×۲۵	۶۸۵۷۶۳
				۱۲×۲۵	۶۸۵۷۶۴
هیدروتک HydroTac	۱۰×۱۰	۶۸۵۸۳۲	Hydrocoll هیدروکل	۱۰×۱۰	۹۰۰۹۳۸
	۱۰×۲۰	۶۸۵۸۴۱		۱۵×۱۵	۹۰۰۹۳۹
	۲۰×۲۰	۶۸۵۸۴۲		۲۰×۲۰	۹۰۰۹۴۰

محصولات هارتمن در یک نگاه

HydroClean Advance: پانسمان حاوی ذرات فوق جاذب پلی آکریلات به همراه سلولز و رینگر که به تسهیل دبریدمان تدریجی، کاستن میکروارگانیزم از طریق برداشت و توقیف آن در ذرات فوق جاذب و کمک به پاکسازی تاندون و استخوان



Hydrosorb Gel: ژل حاوی رینگر جهت تسهیل دبریدمان بافت مرده



HydroTac Transparent: پانسمان ورقه ای شفاف از جنس پلی اورتان حاوی ژل، مناسب برای زخم های اپیتلیزه یا سوختگی درجه دو



Hydrocoll: پانسمان هیدرو کلوئید برای درمان زخم های غیر عفونی با ترشحات کم تا متوسط



Sorbalgon: پانسمان یا تامپون از رشته های آلژینات کلسیم برای درمان زخم های با اگزودا متوسط تا زیاد



Atrauman Ag: پانسمان نقره چرب جهت پیشگیری و کنترل عفونت



HydroTac: پانسمان فوم حاوی ژل رینگر برای زخم های با ترشح کم تا متوسط



Zetuvit E: پانسمان فوق جاذب جهت زخم هایی با ترشح خیلی زیاد



Zetuvit Plus Silicone/Border: پانسمان فوق جاذب سیلیکونی با خاصیت کاهش فشار از موضع زخم جهت زخم های با ترشح خیلی زیاد



Hydrofilm: پانسمان خود چسب شفاف برای حفاظت و درمان زخم های کم ترشح



HARTMANN



authorized distributor

Going further for health



Wound
Management

Hartmann Solution Customer Satisfaction



